

按鍵滑鼠使用說明

2009 年 7 月

特色：

按鍵滑鼠乃是針對某些手指功能不佳，無法使用一般滑鼠的個案所設計的，它是使用按鍵來操作電腦游標，不需要安裝任何驅動程式及外接電源，只要將插頭插入電腦的 USB 插孔便可以使用，並且納入了鍵盤上的「空白鍵」、「上下捲動鍵」以及「ENTER 鍵插座」等三種功能，為使用者帶來了更多的便利性；另外還設計了可以直接調整游標移動速度的功能，如此便於在旁協助者或使用者設定及使用。按鍵滑鼠也可以與一般滑鼠同時在同一台電腦上使用，彼此並不衝突。

功能說明：

游標速度 使用前先選擇適用的速度，有五種速度可供循環調整，按下按鈕即可調整速度。所選擇的速度會被記憶住，如此在下次使用時速度不用重新設定。

方向鍵： 一組四個同色的按鍵，分別代表上、下、左、右四個方向。按下按鍵時，電腦游標即往按鍵代表的方向移動。當游標要移往斜向時，可以將相臨的兩個按鍵同時按住。其移動的速度為恆定，沒有加速度。

功能鍵： 共有六個鍵分別代表六個功能：左鍵、右鍵、拖曳、左鍵兩次、空白鍵、上下捲動鍵（瀏覽網頁時適用）。

按鍵指示燈： 顯示拖曳或捲軸狀態被啟動。當再按一次拖曳鍵或是捲軸鍵，即可解除。當欲取消“拖曳”及“右鍵”功能時可以按“左鍵”解除鎖定。

ENTER 插座： 可外接開關，用以啟動鍵盤上 ENTER 鍵之功能。

規格：

左右寬 26 公分，前後長 19 公分，前高 4 公分、後高 8 公分。

其他：

- 1.將按鍵滑鼠放置於穩固的桌面及使用者易於使用的位置，留意使用者是否會被電線影響動作。
- 2.將插頭插入電腦 USB 插座中，欲拔除搖桿滑鼠時，可以直接將插頭拔離插座，如一般滑鼠。



第一輔具研製中心 製

電話:(02) 2722-4136 分機 840、841

傳真: (02)2722-3137

E-mail: diyird@diy.org.tw

網址: <http://www.diyi.org.tw>